

# VACOped – NAVODILA ZA UPORABO



## Odstranitev podplata

Oba vzvoda za sprostitvev pritisnemo istočasno navzdol

Podplata potisnemo nazaj in odstranimo

## Namestitev podplata

Podplata kot prikazano na sliki - vstavimo

Podplata potisnemo naprej, dokler se vzmet silno ne zaskoči

## 1. Preobleka vakuumske blazine



## 2. Namestitev



- z mehko vakuumsko blazino

## 3. Zapenjanje pasov



- ta postopek lahko po potrebi večkrat ponovimo, dokler ne dosežemo optimalne lege

## 4. Izčrpavanje zraka



## Prilagoditev vakuumske blazine

**Rahljanje vakuumske blazine**  
- obroč ventila potegnemo navzgor in rahlo potisnemo v stran



**Utrditve vakuumske blazine**  
- z vakuumsko črpalko izsesamo zrak iz blazine in jo fiksiramo



- pokrov ventila zapremo



## Menjava sprednjega adapterja

- ustrezní adapter vstavimo na eni strani v vodilo  
- s potegom zapnemo adapter še na drugi strani



## Zamenjava zadnjega adapterja



- vstavimo ustrezní adapter (FIX ali ROM)  
- puščico nastavimo na želeno oznako kota (pri FIX-adapterju)  
- nastavitve fiksiramo s ključem za adapter

**Velikost** S 35-39 ■ M 30-42 ■ L 42-46

Dodatne informacije so na voljo na: [www.oped.si](http://www.oped.si), e-mail: [marko.kralj@oped.si](mailto:marko.kralj@oped.si) ali telefonski številki 031 893 491.



OPED GmbH - Medizinpark 1 - 33626 Valley/Oberlindern - Germany - Fon +49 (0)80 24/60 81 82-10 - Fax +49 (0)80 24/60 81 82-99 - mail@oped.de - www.oped.de  
OPED Slovenija - TKM KRALJ VITAL - Marko Kralj s.p. - Šentvid 3b - 1296 Šentvid pri Sotni - Tel./Fax 01 788 5112 - GSM 031 893 491 - e-mail: marko.kralj@oped.si - www.oped.si

